

SCR1450 – LETTINO PEDIATRICO



MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ATTENZIONE! Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE

Il lettino pediatrico è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, all'interno dei reparti di pediatria, ed ambulatori pediatrici. Viene usato per accogliere i bambini fino a 4 anni circa di età durante tutta la degenza ospedaliera e per facilitare gli spostamenti nei reparti.

È costituito da un telaio perimetrale fisso con piano rete saldato ad esso; le spalle portanti sono predisposte per l'aggancio al piano rete tramite speciali bulloni estraibili che impediscono la deformazione della struttura; le sponde laterali scorrono su guide in acciaio e sono dotate di dispositivo di sicurezza.

Il letto è dotato di 4 ruote girevoli di cui 2 dotate di freno indipendente.

COMPONENTI




- N.1 Telaio con rete
- N.2 Spalle portanti testa/piedi con ruote
- N.2 Sponde laterali scorrevoli

Kit con materiale di montaggio

<p>n.4 VITI TTQ 6X50 n.4 ranelle n.4 bulloni</p>	
<p>Chiave M6/M10</p>	

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

Iniziare la fase di montaggio predisponendo un piano orizzontale di lavoro.

MONTAGGIO SPALLE DI TESTA/PIEDI		
<p>Prendere la rete ed appoggiarla su un piano ed infilare le due spalle negli innesti.</p>		
<p>Inserire le viti in dotazione, mettere rondella, dado e stringere.</p>		

MONTAGGIO SPONDE LATERALI

Svitare le vite a farfalla (**fig.1 e 2**)
Estrarre i trafilati tondi di acciaio cromato dalla sede delle spalle (**fig.3**).

Ed infilare le sponde laterali bloccando i trafilati con le apposite vite a farfalla.

Per la seconda sponda appoggiarsi sulla quella appena montata e procedere nello stesso modo.



1



2



3

MOVIMENTO VERTICALE SPONDE LATERALI

Il movimento deve essere effettuato mediante dispositivo centrale posto sotto il telaio rete:

- Alzare la sponda e a fine corsa bloccare con maniglia nera sotto il piano rete.
- Sbloccare con maniglia nera sotto il piano rete la sponda e abbassare.





Sponda alzata con maniglia bloccata



Sponda abbassata con maniglia sbloccata

FRENI

Per azionare il freno premere con il piede il pedale installato sopra le ruote.
Rialzare il pedale per tornare alla posizione libera.

SCHEDA TECNICA

Misure	Cm 136x75x131h Scatola cm 137x80x18,5
Peso	35 kg (con scatola 37,3 kg)
Portata massima	50 kg

AVVERTENZE D'USO

- Le persone non a conoscenza delle istruzioni d'uso non devono utilizzare il letto.
- L'operatore è responsabile verso terzi nell'utilizzo del lettino/culla nella zona di lavoro.
- La movimentazione delle sponde laterali è consentita solo per la necessità del paziente.
- Non è consentito l'utilizzo per altri scopi.
- Togliere eventuali corpi estranei dall'area di lavoro.
- **Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.**
- Sostituire tempestivamente, per ragioni di sicurezza, parti usurate o danneggiate.
- Prestare massima attenzione durante gli spostamenti del paziente all'interno del reparto.
- Accertarsi prima degli spostamenti che non ci siano ruote frenate.
- Dopo qualsiasi spostamento del letto ricordarsi di bloccare le ruote.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Non utilizzare materassi rigidi (si consiglia l'uso di materassi appositi per lettini).
- **Vietato l'uso in ambienti aperti.**
- **Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.**
- **Verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di movimentazione delle sponde: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**

MANUTENZIONE E PULIZIA


- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio. Si consiglia la manutenzione ogni 4 mesi circa.
- Ruote con freno: a seconda dell'usura della gomma, controllare la piastrina del blocco freno e, nel caso, agire sulla vite di regolazione.
- Controllare il serraggio delle viti e dadi, specialmente quelle delle ruote.

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

GARANZIA

- Il prodotto è garantito un anno per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del prodotto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.

Per informazioni ed assistenza tecnica contattare il produttore:

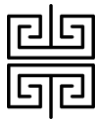

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.

Arredamenti e Lavorazioni di tubo e lamiera
Via Vittorio Veneto 95 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)

TEL. 0331668615 - FAX 0331301120

Partita iva e C.F.: 02223730124

Sito web www.scrosati.com

e-mail scrosati@scrosati.com

LEGENDA – SYMBOLS



Conservare in luogo fresco ed asciutto

Keep in a cool, dry place



Non esporre ai raggi solari

Keep away from sunlight



Consultare le istruzioni per l'uso

Please read instructions carefully



Prodotto conforme Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)

Product complies with Directive (UE) 2017/745 (MDR)



Codice prodotto

Product code



Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso

Read instructions carefully



Fabbricante

Manufacturer



DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

MEDICAL DEVICE CLASS 1